



## Tipps für unsere 3D-Druck Schutzmasken

### Hinweis und Gewährleistungsausschluss

Die Schutzmasken der BBS II Leer sind kein medizinisch zugelassenes Produkt!

Die Wirksamkeit zum Schutz vor Covid-19 ist nicht zertifiziert und kann von den BBS II Leer nicht gewährleistet werden.

Bei korrektem Sitz der Masken und Anpassung an die Gesichtsform gibt es Hinweise darauf, dass bei ausreichend dimensionierter Filterung (Filtereinsätze) die Einatmung von Coronaviren stark reduziert werden kann.

### Tipps zur Handhabung der Masken:

1 Passen Sie die Masken bestmöglich an ihre Gesichtsform an. Achten Sie darauf, dass außer durch den Filtereinsatz keine Luft durch die Ränder der Maske einströmt. Sie können Moosgummi oder andere ungefährliche/haut-agenverträgliche Dichtungsmaterialien zur Abdichtung und Anpassung verwenden.

2 Die Masken verfügen über eine Aufnahme von Filtermaterialien. Diese Filter können ausgetauscht werden.

**Achten Sie darauf, dass Sie genügend Luft durch den Filter einsaugen können. Vermeiden Sie dadurch unbedingt einen CO<sub>2</sub>-Stau.**

Auf unserer Webseite haben wir drei HEPA-Filter von Dritt-Herstellern verlinkt, die als Filtervorlage dienen können.

Auch hier übernehmen wir natürlich keine Gewährleistung.

Zuschneiden der Filtereinsätze:

a) Achten Sie auf eine gute Passgenauigkeit der Filtermaterialien in die Aufnahmevorrichtungen. An den Rändern der Filter darf keine Luft vorbei einströmen können.

b) Flammen (Vorsicht: langsam!) Sie die Ränder von den zugeschnittenen HEPA-Filtern ab, damit Sie keine Fasern des Filtermaterials einatmen.

c) Auf unserer Webseite finden sie ebenfalls 2 Videos die den Filteraustausch zeigen.

**3. Lüften Sie die Maske immer wieder zwischendurch, um unbedingt einen gefährlichen CO<sub>2</sub>-Stau und übermäßige Schweißbildung innerhalb der Maske zu vermeiden.**